



GEBRUIKSAANWIJZINGEN - DAISYGRIP

Toepassing - Herbruikbare en volledig desinfecteerbare stuwband voor bloedafname



Toepassing: Het slot van de stuwband is magnetisch, hierdoor opent en sluit het makkelijk.
Plaats de stuwband ongeveer 5 tot 10 cm voor de plaats waar je het bloed gaat afnemen.



Bloedafname: Controleer nogmaals de juiste positie voor bloedafname bij de patiënt. Trek de stuwband geleidelijk aan naar beneden in een hoek van 45°. De puls moet voelbaar blijven.



Spanning verminderen: Beweeg de sluiting naar boven tussen duim- en wijsvinger om spanning op de stuwband te verminderen.



Losmaken: Ontgrendel de stuwband door beide delen van het slot zijdelings te schuiven.



Reiniging en desinfectie: Reinig en desinfecteer de stuwband volgens de protocollen van het ziekenhuis.

Veiligheid

- Desinfecteer de stuwband voor en na gebruik om overdracht van micro-organismen te voorkomen
- Wees voorzichtig bij het aanspannen/losmaken van de stuwband. Gebruik beide handen om ongecontroleerd losschieten te voorkomen
- Temperatuurbereik: 5°C - 50°C
- Steriliseer de stuwband niet met hitte
- Gooi stuwbanden met zichtbare slijtage weg
- Plaats de sluiting niet rechtstreeks op een pacemaker en gebruik deze niet op de MRI
- Niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar
- Latexvrij

Materiaal:

Sluiting: Polypropyleen (ExxonMobil™ PP9074MED)

Stuwband: Siliconen (DIN ISO 10993)