

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1.

### Toepassing

Het slot van de stuwband is magnetisch, hierdoor opent en sluit het makkelijk.

Plaats de stuwband ongeveer 5 tot 10 cm voor de plaats waar je het bloed gaat afnemen.

Plaats een wijsvinger tussen de band en de huid om knelling te voorkomen.



2.

### Spanning verminderen, losmaken

Beweeg de sluiting naar boven tussen duim- en wijsvinger om spanning op de stuwband te verminderen.

Ontgrendel de stuwband door beide delen van het slot zijdelings te schuiven.



3.

### Desinfectie



Reinig en desinfecteer de stuwband volgens de protocollen van het ziekenhuis.