

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1.

Toepassing

Het slot van de stuwband is magnetisch, hierdoor opent en sluit het makkelijk.

Plaats de stuwband ongeveer 5 tot 10 cm voor de plaats waar je het bloed gaat afnemen.

Plaats een wijsvinger tussen de band en de huid om knelling te voorkomen.



2.

Spanning verminderen, losmaken

Beweeg de sluiting naar boven tussen duim- en wijsvinger om spanning op de stuwband te verminderen.

Ontgrendel de stuwband door beide delen van het slot zijdelings te schuiven.



3.

Desinfectie



Reinig en desinfecteer de stuwband volgens de protocollen van het ziekenhuis.